



MILIAN LITE Monitor dychu pre novorodencov

Návod na rýchlu inštaláciu a Návod na obsluhu

SK - Slovenský

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie, prosím!

Obsah

Strana 3.

Návod na rýchle uvedenie do prevádzky

Poskladanie

Nepoužívajte nabíjateľné batérie!

Zapnutie v režime jedného dieťaťa

Vypnutie

Strana 4.

Nastavenia

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Typ, obsah balenia

Funkcia prístroja

Strana 5.

Fungovanie zariadenia

Používanie v súlade s určením

Varovania

Obmedzenia

Strana 6.

Uvedenie do prevádzky

Skúška po uvedení do prevádzky

Strana 7.

Zmena prahovej hodnoty

Prehrávanie pamäte

Sledovanie napätia batérie

Strana 8.

Spôsobu umiestnenia snímacích dosiek s
nákresom pohľadu zhora na postieľku

Strana 9.

Umiestnenie suchého zipsu

Strana 10.

Použitie špirál na upnutie vedenia

Technické údaje, čistenie, údržba

Informácie o bezpečnej manipulácii s batériami

Návod na rýchle uvedenie do prevádzky

Poskladanie

1. Umiestnenie snímacích dosiek podľa obrázkového návodu na skompletizovanie uvedeného na zadnej strane škatule alebo v „Návode na obsluhu“. **DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!** Vedenia snímačov umiestnite tak, aby na ne dieťa nemalo dosah.

2. Vloženie batérií: pomocou štrbín na zadnej strane odstráňte kryt prístroja. Hornú a dolnú časť možno oddeliť ručne, nie sú potrebné žiadne nástroje.

Používajte výhradne alkalické batérie typu „AA“! Nepoužívajte nabíjateľné batérie!

Regulátor napätia v nabíjateľných Li-ion batériách neposkytuje žiadne varovné signály o ich vybíjaní; indikujú plné nabitie až do okamihu, keď sa napájanie náhle preruší.

Nabíjateľná batéria môže kedykoľvek nečakane prestať fungovať. To predstavuje neprijateľné riziko pri používaní monitorov dychu či akýchkoľvek bezpečnostných zariadení. Z podobných dôvodov bolo používanie nabíjateľných batérií (napr. NiMH) v produktoch značky Milian od začiatku zakázané, keďže sa môžu vybiť – napríklad aj počas noci –, čo spôsobuje komplikácie rodičom a predstavuje riziko pre dieťa. Používanie nového typu nabíjateľných 1,5 V Li-ion batérií je však obzvlášť nebezpečné, a preto je v monitoroch dychu Milian prísne zakázané!

Spôľahlivo možno predpovedať len vybíjanie štandardných alkalických batérií! Každý model monitora dychu Milian inteligentne monitoruje a spoľahlivo predpovedá očakávané vybíjanie alkalických batérií.

3. Vrátenie krytu prístroja: sledujte, aby bol LED a tlačidlo v polohe pod dierou a kryt opatrne zatlačte na svoje miesto. Pri skladaní hornej časti nie sú potrebné skrutky. Pre zloženie stlačte biely rám hornej časti.

Zapnutie v režime jedného dieťaťa

Stlačte a podržte tlačidlo označené  na čelnej strane prístroja. Keď sa na displeji zobrazí čiara obiehajúca okolo (približne po 1 sekunde), uvoľnite tlačidlo. Na displeji sa zobrazí "E" a za ním číslo od 1 do 5, ktoré označuje úroveň napätia batérie (5 vysoké, 1 nízke napätie). Potom sa na krátku dobu zobrazí výrobcom nastavená prahová hodnota L 3 (podrobnosti nájdete na strane 6 Návodu na obsluhu), po ktorej nasleduje každé 3 sekundy číslo úmerné detekcii pohybu od 0 do 9 (0 žiadny pohyb, 9 silný pohyb).

Keď zobrazené číslo dosiahne alebo prekročí prahovú hodnotu (3), LED dióda vľavo od displeja bliká na zeleno, čím signalizuje, že hodnota pohybu je správna.

Vypnutie

V zapnutom stave stlačte tlačidlo  po krátku dobu, max. 1-2 sekundy. Keď sa zobrazí "≡", pustite tlačidlo, následne ho opäť krátko stlačte. Prístroj po dvoch krátkych zvukových signáloch vypíše: "OFF", a vypne sa. To všetko (dve stlačenia a zvukový signál) je potrebné z toho dôvodu, aby prístroj nebolo možné náhodne vypnúť, respektíve aby zvuk informoval o vypnutí. Zvukový

signál môže byť niekedy rušivý, nežiaduci, preto ak po zobrazení sa "≡" na druhý krát podržíte tlačidlo dlhšie (kým z obrazovky nezmizne "≡"), prístroj sa vypne bez zvuku.

Nastavenia

Prístroj funguje bezpečne aj bez užívateľských nastavení. Môže sa ale vyskytnúť taká okolnosť, keď je účelné pozmeniť nastavenie od výroby, alebo by ste si jednoducho zvolili len iný režim zobrazenia. Môže to byť napríklad vtedy, ak potrebujete eliminovať vplyv rušivých vibrácií spôsobených hustou premávkou na ulici (podrobnosti nájdete na strane 6 Návodu na obsluhu).

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Milý Rodičia!

Ďakujeme, že ste si vybrali monitor dychu Milian Lite!

Ani ten najstarostlivejší rodičovský dohľad nedokáže to, čo monitor dychu Milian Lite: neustále monitoruje každú vibráciu dieťaťa a dokonca včas signalizuje, ak zaznamená abnormálny pohyb alebo nedostatok pohybu. Rodič tak má možnosť zasiahnuť, zabrániť rozvoju procesu, ktorý by mohol mať vážnejšie následky. Prístroj signalizuje, ak sa vyskytne problém, ale nenahrádza rodičovskú starostlivosť. Prístroj nie je prístrojom na záchranu života – **ale vy a monitor dychu Milian Lite však spoločne môžete zachraňovať životy!**

Pozorne si prečítajte tento návod a výrobok používajte iba v súlade s návodom na používanie! „Stručný návod na použitie“ dodávaný so spotrebičom poskytuje základné informácie o prevádzke spotrebiča, ale pre bezpečné používanie je nevyhnutné poznať nasledovné:

Typ, obsah balenia

- **Milian Lite 1:** Centrálna jednotka MB-01, **1 ks snímacia doska 30x50 cm**, 1 ks špirála na upevnenie vedenia, 2 ks tužkové batérie typu „AA“, 2 ks suché zipsy, stručný návod na použitie, návod na použitie, záručný list.

Poznámka: Odporúčame predovšetkým na použitie pod hniezdočko pre bábätko, do kolisky alebo do detskej postelky.

- **Milian Lite 2:** Centrálna jednotka MB-01, **2 ks snímacie dosky 30x50 cm**, 2 ks špirály na upevnenie vedení, 2 ks tužkové batérie typu „AA“, 2 ks suché zipsy, stručný návod na použitie, návod na použitie, záručný list.

Poznámka: Odporúčame použiť do postelky 60x120 cm.

- **Milian Lite 3:** Centrálna jednotka MB-01, **3 ks snímacie dosky 30x50 cm**, 3 ks špirály na upevnenie vedení, 2 ks tužkové batérie typu „AA“, 3 ks suché zipsy, stručný návod na použitie, návod na použitie, záručný list.

Poznámka: Odporúčame použiť do postelky 60x140 cm.

Funkcia prístroja

Sledovať pohyb zdravého bábätka. V prípade abnormálneho pohybu alebo nedostatku pohybu upozornenie rodiča so zvukovým signálom a krátkou textovou informáciou.

Fungovanie zariadenia

Zariadenie deteguje pohyb dieťaťa pomocou jednej alebo viacerých snímacích dosiek. Priebežne analyzuje signály snímačej dosky, zobrazuje silu pohybu a v prípade potreby dáva rodičovi pokyn na zásah (zvuk, svetlo, zobrazenie textu).

Snímacia doska (dosky) je možné umiestniť pod matrac alebo nad matrac v súlade s Návodom na použitie.

Základná funkcia: ak sila pohybu nedosiahne nastavenú hranicu po dobu 12 sekúnd, prístroj sa pokúsi 3 krátkymi pípnutiami prinútiť dieťa k razantnejšiemu pohybu. Ak sa to nepodarí, len v tom prípade zaznie zvukový signál pre rodiča. Pri príprave na takúto udalosť je vhodné vopred požiadať o radu svojho detského lekára.

Nepretržitým analyzovaním pohybov dieťaťa môže monitor dychu MILIAN Lite rodičom včas poskytovať také signály, vďaka ktorým je možné predísť veľkým problémom.

Používanie v súlade s určením

- Nie je možné použiť a nie je vhodný na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akejkoľvek choroby!
- Zariadenie nie je vhodné na prevenciu voči syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), pretože v takom prípade ide o neočakávanú, bezprecedentnú udalosť. Pri úspešnosti resuscitácie však zohráva obrovskú úlohu včasná detekcia a pripravenosť rodičov.
- Nie je zdravotno-technickým prístrojom.
- Nenahrádza rodičovský dohľad a zodpovednosť!
- Odporúčame absolvovať kurz prvej pomoci pre bábätká

Varovania

Kábel snímacích dosiek pripevnite k postieľke tak, aby na ne dieťa nemohlo dosiahnuť alebo ich k sebe vtiahnuť. Môže vám s tým pomôcť priložená špirálová káblová svorka. Pri pripevňovaní centrálnej jednotky prístroja k postieľke použite pevný suchý zips dodaný s jednotkou. Centrálnu jednotku umiestnite na postieľku tak, aby vaše dieťa naň nemohlo siahnuť za žiadnych okolností. Centrálnu jednotku pred dieťaťom je vhodné oddeliť zábranou na posteľ. Centrálnu jednotku nikdy nezakrývajte ani na ňu nič nekladte! Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom! Nedovoľte, aby zariadenie obsluhoval väčší súrodenec! Správna obsluha zariadenia je úlohou a zodpovednosťou rodiča!

Obmedzenia

Keďže zariadenie je veľmi citlivým monitorom pohybu, z toho dôvodu pri jeho používaní je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel.

- Minimalizujte vibrácie a pohyby z okolia! Ide napríklad o ventilátor, klimatizáciu, prievan, pohyb podlahy v dôsledku šliapania, hra väčších detí v okolí postieľky a pod.
- Ak sa spotrebič používa v kolíske, kolíska sa nesmie dostať do kontaktu s posteľou pre dospelých, pretože môže dôjsť k prenosu pohybu dospelých!
- Detská postieľka nesmie byť v dosahovej vzdialenosti od detskej postieľky iného dieťaťa alebo postele dospelého.
- Citlivosť prístroja je nastavená na sledovanie pohybu dojčiat a malých detí, preto monitor dychu nepoužívajte po 2 rokoch veku alebo u detí s hmotnosťou nad 20 kg.
- Spotrebič je možné použiť s akýmkoľvek komerčne dostupným matracom, ktorý možno umiestniť do postieľky!

Uvedenie do prevádzky

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte „Stručný návod na použitie“ dodaný so zariadením.

Je dôležité umiestniť snímacie dosky podľa hmotnosti dieťaťa a veľkosti postieľky. Pomôže vám s tým fotografický sprievodca umiestnený na zadnej strane škatule alebo Sprievodca inštaláciou na našej webovej stránke v časti „Dokumenty“ (<https://milianbaby.hu/telepitesi-utmutato/>) alebo táto Používateľská príručka.

Vo všeobecnosti, kým sa dieťa nebudete plaziť v spánku a vážiť viac ako 3,5 kg, používajte **jednu** snímaciu dosku pod matracom, umiestnenú v rovnakom smere ako dieťa. Pri tomto umiestnení bude dieťaťko po celej dĺžke nad snímacou doskou, čím sa vyhnete vedľajšiemu uloženiu. Ak dieťa zo svojho miesta odlezie, bude potrebné umiestniť ďalšiu snímaciu dosku. V prípade lezenia je vhodné umiestniť snímacie dosky v postieľke krížom, vo vzdialenosti 5-15 cm od seba.

Dôležité je tiež použiť **jednu** snímaciu platňu, nie však pod matrac, ale **nad matrac, kým dieťaťko nedosiahne hmotnosť 3,5 kg**, aby nedošlo k falošnému poplachu. Týmto riešením dočasne odoberieme matrac spomedzi bábätko a snímač dosky pre bezpečné snímanie, kým dieťaťko nebude vážiť viac ako 3,5 kg. Pre pohodlie dieťaťa prikryte snímaciu dosku detskou dekou alebo dvakrát zloženou mäkkou dekou. Ak dieťa váži viac ako 3,5 kg, je vhodné umiestniť snímaciu dosku pod matrac.

Podobne umiestnite snímacie dosky nad matrac, ak sa má dieťa položiť na bok, a to aj vtedy, keď už váži viac ako 3,5 kg. V tomto prípade sa časti tela, ktoré sa pohybujú počas spánku (brucho, hrudník), pohybujú do strán a dieťa navyše leží na ruke, takže sa na matrac a na snímaciu dosku (dosky) sa prenáša oveľa menej pohybu.

Skúška po uvedení do prevádzky

Zapnite zariadenie bez dieťaťa (stlačte vypínač na približne 2 sekundy), potom sledujte displej. Postavte sa trochu ďalej, aby ste svojim pohybom neprekážali snímaniu. V tomto prípade je prijateľná hodnota 0-1.

Po dosiahnutí pokojového stavu (prvé číslo zobrazené pod prahovou hodnotou) približne po 12 sekundách zariadenie prvýkrát krátko pípne, čo znamená, že bol zaznamenaný príliš dlhý pohyb pod prahovou hodnotou. V tomto prípade, ak dieťa reaguje na zvuk pohybom, prístroj spustí monitorovací cyklus od začiatku. Teraz pri nácviku trochu zatlačte na matrac namiesto dieťaťa, aby ste znova spustili pozorovací cyklus.

Zariadenie vydá tri takéto krátke pípnutia, ak nedostane pohybovú spätnú väzbu a až potom sa aktivuje alarm, po cca. 20 sekúnd po dosiahnutí pokojového stavu. V takomto prípade môže alarm zastaviť krátkym stlačením iba rodič.

Ak bol test úspešný aj bez bábätko, skúste to aj s bábätkom. Ak je dieťa bdelé, v prípade číselného zobrazenia musí priemerná hodnota signálu dosiahnuť aspoň 8-9.

Keď vyberiete dieťa z postieľky, po ukončení dočasnej veľkej zmeny signálu, zariadenie musí bezpečne oznámiť, že sa dieťa prestalo hýbať. Tu si treba uvedomiť, že existujú matrace, ktoré po vybratí bábätko vykazujú následný pohyb pomerne dlhú dobu, až 10-20 sekúnd z dôvodu úbytku hmotnosti, čo zariadenie vníma ako pohyb. Našťastie sa to v reálnej situácii, keď je bábätko v postieľke, stať nemôže.

Ak pri testovaní bez bábätká zistíte, že zariadenie v pokoji občas alebo nepretržite v pokoji ukazuje hodnotu vyššiu ako 0-1, znamená to, že deteguje nejaký pohyb vonkajšieho pôvodu. Zistite jeho pôvod a pokúste sa odstrániť alebo obmedziť rušivý pohyb!

Môže sa stať, že vonkajší rušivý pohyb nie je možné eliminovať, napríklad v prípade hustej pouličnej premávky. V tomto prípade by mal byť prah detekcie pohybu nastavený o 2 jednotky vyššie ako je hodnota zaznamenaného rušenia. Napríklad, ak je hodnota rušenia v prípade číselného zobrazenia 3, nastavte prah „L“ na 5. Môžete to urobiť v ponuke zariadenia podľa „Stručného návodu na použitie“. Tým sa eliminuje možnosť vonkajšieho rušenia, ale zároveň bude zariadenie menej citlivé aj na pohyby bábätká. Preto môže byť potrebné umiestniť snímaciu dosku nad matrac, kým dieťa nebude vážiť viac ako 4 kg.

Továrensky nastavená prahová hodnota „L“ = 3 sa bežne počas používania nemusí meniť, len v tom prípade, pokiaľ nie je možné odfiltrovať vonkajšie rušivé pohyby iným spôsobom.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA! PRAHOVÚ HODNOTU „L = 3“ NASTAVENÚ VO VÝROBE ZMENE IBA V ODÔVODNENOM PRÍPADE!

Zmena prahovej hodnoty L=3: Zapnite prístroj. Keď sa dostane do prevádzkového stavu (5 sekúnd), stlačte a podržte tlačidlo napájania. Keď sa na displeji zobrazí "≡", uvoľnite tlačidlo a potom ho znova stlačte a podržte, kým sa nezobrazí "L" (približne 6 sekúnd).

Krátkym stlačením tlačidla môžete krokovat prahové čísla a dlhším stlačením tlačidla prahové číslo vybrať. Zariadenie zaznamená novú prahovú hodnotu, vypíše "P" a krátko pípne, čím potvrdí dokončenie operácie.

Opakujte vyššie uvedený test, aj keď premiestňujete prístroj alebo postieľku. Bez ohľadu na to by sa testovanie malo vykonávať aj raz týždenne.

M - (Prehrávanie pamäte - MEMORY REPLAY) - Prístup z ponuky, ako je popísané v „Stručnom návode na použitie“. Je možné prezerať zobrazenia za posledných 12 minút.

Skontrolovať údaje uložené v pamäti môže byť potrebné, ak napríklad došlo k poplachu, ale dieťa je v poriadku. Nie je v tomto prípade jasné, či bol poplach pravdivý alebo falošný. Pre určenie príčiny vám môže pomôcť kontrola údajov posledných 12 minút pred poplachom.

Prehrávanie prebieha v 1-minútových prírastkoch, od 12. minúty späť v čase. Preto prvé zobrazenie bude P12, potom sa spustí prehrávanie 12. minúty, pôvodná rýchlosť zobrazenia sa zrýchli na 3x. Ak je zariadenie ešte nové a v pamäti nie sú zaznamenané údaje za 12-minút, zariadenie sa spustí na začiatku skutočne zaznamenaných údajov, napríklad P5, čo znamená 5 minút prehrávania.

Ak nechcete sledovať celých 12 minút, krátkym stlačením tlačidla môžete preskočiť na začiatok ďalšej minúty. Na displeji sa na chvíľu zobrazí „L“.

Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte a podržte tlačidlo. Po zobrazení „OFF“ sa prehrávanie pamäte ukončí a jednotka sa zastaví.

Sledovanie napätia batérie

Pre správne fungovanie zariadenia je nevyhnutné, aby boli batérie v dobrom stave. Preto je obzvlášť dôležité, aby sa batérie vymenili včas, keď zariadenie signalizuje, že batérie sú vybité. Počíta sa však s tým, že spotrebič z dôvodu výmeny batérií nebude signalizovať v zapnutom stave (keď bábätko práve zaspí) alebo počas prevádzky v noci.


Monitoring batérie je nastavený tak, ak prístroj po zapnutí vyhodnotí stav batérií za vhodné, batérie môžu zabezpečiť prevádzku monitora dychu na ďalších 12 hodín.

Počas procesu vypínania zariadenie opäť kontroluje stav batérií a ak sa priblíži k nedostatočnej hodnote ($<2,8V$), ozve sa zvuk a bude blikat' schéma batérie. V tomto prípade je potrebné batérie vymeniť! Ak sa tak nestane, signalizácia sa zopakuje aj pri ďalšom **zapnutí**. Ak bola medzičasom batéria natoľko vybitá ($<2,7V$), že to už ohrozuje bezpečnú prevádzku, zariadenie nie je možné zapnúť a batérie je potrebné každopádne vymeniť.


S týmto sofistikovaným monitorovaním batérie sa môžete vyhnúť signalizácii stavu batérie, ktorý narúša pokoj vášho dieťaťa, pretože pri vypnutí zaznie varovný zvuk iba vtedy, keď je vaše dieťa pravdepodobne prebudené. Ak sa potom vykoná potrebná výmena batérie, ďalšie zapnutie prebehne bez zvukového signálu.

Spôsobu umiestnenia snímacích dosiek s nákresom pohľadu zhora na postieľku

Ak váha dieťaťa **nedosahuje 3500 gramov**, mala na matrac sa umiestňuje 1 snímacia doska v pozdĺžnom smere. Snímaciu dosku a kábel prikryte plachtou a potom pre pohodlie dieťaťa pod dieťa umiestnite detskú prikrývku. Dieťa musí byť umiestnené nad snímacou doskou s bruškom okolo stredu dosky:

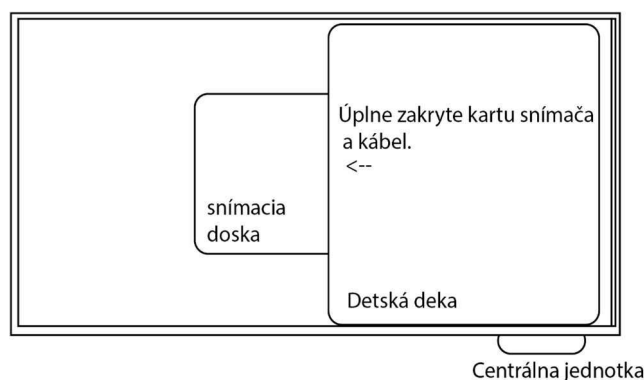


Keď váha dieťaťa dosiahne a prekročí 3 500 gramov, medzi rám postele a matrac umiestnite 1 snímaciu dosku do obdobia, kým dieťa zo svojho miesta nevylieza. Dieťa musí byť umiestnené nad snímacou doskou s bruškom okolo stredu dosky:

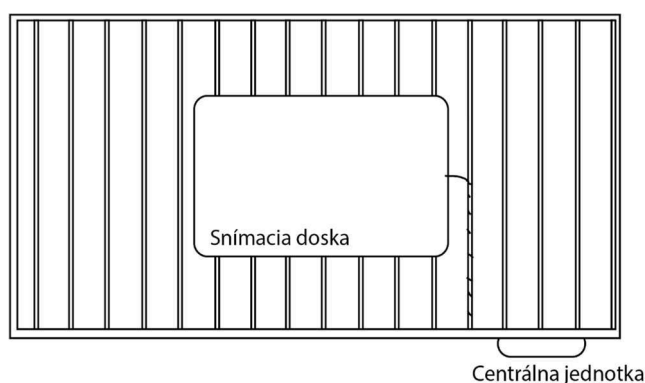


Ak dieťa **váži nad 3 500 gramov**, a ak už **vylieza** zo svojho miesta, snímacie dosky umiestnite tak, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku:

Ideálne usporiadanie pre **postieľku 60 x 120 cm** s **2** snímacími doskami:

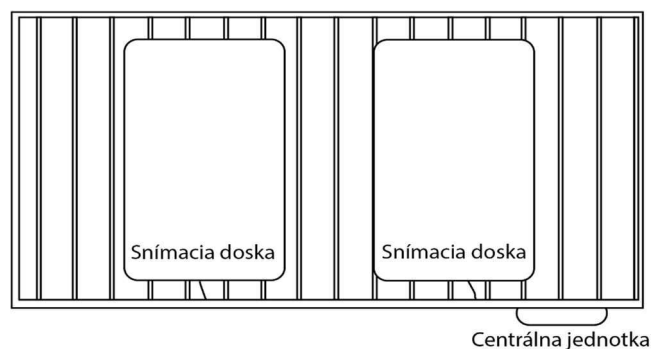

Ideálne usporiadanie pre **postieľku 60 x 140 cm** s **3** snímacími doskami a „Y“ rozdeľovačom:
Do stredu umiestnite tú snímaciu dosku, ktorá je priamo pripojená k centrálnej jednotke.

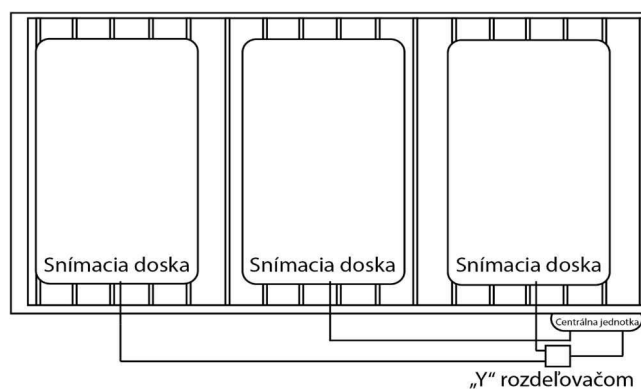


Umiestnenie suchého zipsu

V balení prístroja nájdete 2 pevné, samolepiace suché zipsy, pomocou ktorých prístroj môžete pripevniť k postieľke. Jeden prilepte na postieľku na požadované miesto (pre správnu prilnavosť je potrebný čistý povrch bez mastnoty). Druhú polovicu suchého zipsu prilepte na zadnú stranu zariadenia, ako je znázornené nižšie:



Použitie špirál na upnutie vedenia

Balenie spotrebiča obsahuje špirálu (špirály) na upnutie vedenia, ktoré je potrebné umiestniť na zvislú mriežku postelky, ako je znázornené nižšie, a pridržať ňou vedenia. V prípade potreby aj vedenia niekoľkokrát navíňte na mreže postele.

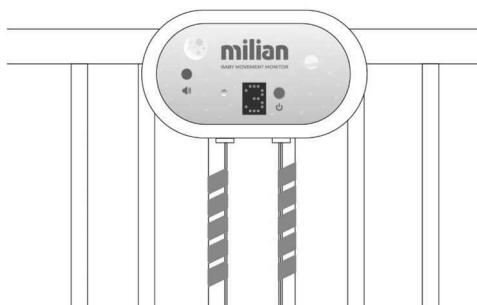

Technické údaje, čistenie, údržba

Prúdový odber centrálnej jednotky je 0,3-0,5 mA, v závislosti od typu zobrazenia. Predpokladaná životnosť batérie je cca. 2000-3000 prevádzkových hodín, za predpokladu alkalickéj batérie s kapacitou 1500 mAh. Dvojstupňová signalizácia napätia batérie, bezpečnostné obmedzenie. Typ displeja: 7 segmentov, zelená farba. Typ zvukovej signalizácie: piezoelektrická, hlasitosť 75-80 dB.

Keďže monitorovanie batérie zariadenia je nastavené na 2 ks 1,5 V „AA“ alkalické batérie, **nie je možné použiť iný typ batérie alebo** dobíjacie batérie z dôvodu rozdielneho napätia. Emisia elektrického šumu (elektrosmog) zariadenia nie je prakticky merateľná.

Zaťažiteľnosť: 20 kg, ak sú snímacie dosky rovnomerne umiestnené pod matracom. V prípade umiestnenia snímačej dosky nad matracom je zaťažiteľnosť 10 kg, na každú snímaciu dosku.

Použitie plastov sa používa aj v zdravotníctve (PVC, polykarbonát), nevylučujú rozpúšťadlá, ich používanie je bezpečné. Snímacie dosky sú chránené pred kvapkajúcou vodou. Môžu sa čistiť vlhkou mydlovou handričkou a dezinfikovať sanitárnymi čistiacimi prostriedkami. Centrálna jednotka nie je chránená proti vode, čistenie je možné vlhkou handričkou, materiálmi používanými pre snímacie dosky. Centrálnu jednotku sa odporúča čistiť v prípade znečistenia, snímacie dosky v prípade znečistenia, najmenej však raz týždenne. Okrem čistenia zariadenie nevyžaduje žiadnu inú údržbu. Pred každým použitím sa odporúča vizuálne skontrolovať stav zariadenia, snímacích dosiek a vodičov. V prípade problému alebo poruchy kontaktujte výrobcu alebo distribútora zariadenia!

Pokyny na vloženie batérií nájdete v „Stručnom návode na použitie“.

Informácie o bezpečnej manipulácii s batériami

- Nikdy nepoužívajte nabíjacie batérie!
- Nikdy nepoužívajte uhlíkovú-zinkovú batérie!
- Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie.
- Nenabíjacie batérie znova nenabíjajte.
- Vložte batérie správnym smerom v súlade s pólmi.
- Vybité batérie vyberte zo zariadenia a vhodne s nimi manipulujte.
- Odporúča sa používanie iba podobných alebo rovnakých batérií.
- Batérie môže vkladať alebo vymieňať iba dospelá osoba.
- Uistite sa, aby sa použité batérie nedostali do rúk deťom a zlikvidujte ich na na to určenom zbernom mieste.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie!
- Keď sa spotrebič už nepoužíva, zlikvidujte ho vo vhodnom zbere na odpad, v súlade s predpismi.
- Spotrebič je možné používať pri teplotách od 10 °C do 35 °C, pri max. 90% vlhkosti.